

Haaranalyse auf Drogen Vorgehen bei der Haarentnahme

1. Schritt:

Einen bleistiftdicken Haarstrang am Hinterkopf zu einem Strang zwirbeln und mit einer Schnur fixieren. So wird gewährleistet, dass sich die Haare nicht gegeneinander verschieben.

2. Schritt:

Haare unmittelbar an der Kopfhaut abschneiden.

3. Schritt:

Haarstränge in die Mitte einer Alufolie legen.

Schnur – und nicht die Haare selbst – mit Tesafilm auf der Alufolie fixieren. Somit ist die Haarwurzel gekennzeichnet.

4. Schritt

Haarspitze und die **Haarwurzelseite** auf der Alufolie kennzeichnen.

5. Schritt:

Alufolie falten, dass es in einen Briefumschlag passt.

6. Schritt:

Das Päckchen mit den Haaren zusammen mit dem Anforderungsschein und Auftragsformular in einen Umschlag stecken und einschicken:

Bavarian Lifescience

Jörg Engler

Äußere Mühener Str. 32b

83026 Rosenheim